

採用用 FLUSH SHEET®

フラッシュシート

特長

フラッシュシートは優れた保持力で採取しやすく、使用後は便と一緒に流せます。



トイレに流せるフラッシュシート

使用手順



フラッシュシートを水たまりへ軽く浮かせて下さい。



フラッシュシートの上に排便します。



便が浮いている状態で採便します。



そのまま水に流して下さい。

使用方法

- ① 排尿後、シートを水洗便器内の水たまりの奥に軽く浮かせて下さい。
- ② 便の採取は、できるだけ速やかに(5分以内)行って下さい。
- ③ 採取後はそのまま流して下さい。

注意事項

- ① 自動洗浄装置(自動フラッシュ機能)付トイレ、節水タイプ(事前便器洗浄機能)付トイレの場合は、事前に電源を切ってから使用して下さい。
- ② シートは水にかからないように、また濡れた手で触れないように注意して下さい。
- ③ 便を採取し終わる迄、便座シャワーは使用しないで下さい。
- ④ **FLUSH SHEET®**は採便以外の目的では使用しないでください。