

院内感染対策に  
ディスポーザブル蓄尿容器

## 蓄尿BOX 3 L


(チクニョウボックス スリーエル)

商品番号: 33-4000



### 蓄尿BOXの使い方

- ①セット内容を確認し、氏名、男女、年齢、  
蓄尿開始日、時、分 を記入してください。  
(セット内容: 箱、蓋(紙製)、ファスナー付ポリ袋)

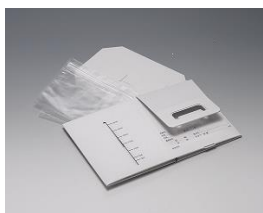

- ②蓋のつまみを引き上げてセットし、4角を整え  
蓋の型にしてください。



- ③箱の内部にファスナー付袋を押し広げてセットしてください。



- ④フラップA、Bを包むように袋を折り返してください。  
(セット完了。蓄尿が開始できます。)

蓋は必要に応じご使用ください。



- ⑤24時間の蓄尿完了後は、袋のファスナーをしっかりと閉じ、  
尿漏れを防止してください。  
蓄尿終了日、時、分、尿量を記入してください。

- ⑥フラップA、Bを蓋の隙間に差し込んでセットし  
下図のように運搬してください。



### ■特長

- 尿の投入が容易な広い投入口です。
- 臭いの拡散防止と他人に尿を見られないよう、蓋(つまみ付)があります。
- 運搬が容易です。
  - ・取っ手の荷重力は9Kg以上あります
- 蓄尿中の個人情報の保護を配慮しています。
  - ・蓄尿者の名前が隠せます
- 自宅蓄尿も簡単です。
- 連続蓄尿時は袋のみ交換で対応できます。

### ■包装

商品コード	品名	入数
33-4000	蓄尿BOX 3 L	50組
33-4020	蓄尿BOX用袋	100枚

### ■仕様

部品名	使用材料	サイズ(mm)
蓄尿箱	紙	145(W) × 145(L) × 180(H)
蓋	紙	155(W) × 155(L) × 30(H)
蓄尿袋3L	ナイロン/PE	160(W) × 20+240(H)

### ■使用上のご注意

- 本品の使用については医師、看護師等の指示に従って実施ください。
- 運搬はファスナーをしっかりと閉じ、過酷な荷重をかけないようにご注意ください。
- 箱は水漏れにご注意ください。

- 本品の廃棄処理は市町村の行政の指示に従って実施ください。(焼却可能です)

 株式会社アトレータ

〒532-0003 大阪市淀川区宮原1-2-5 フレンテ新大阪 403号  
TEL: 06-6151-5207 FAX: 06-6151-5208  
E-mail: info@atleta.biz

URL: <http://www.atleta.biz>